




Erideko 11

Средство для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения

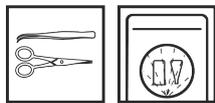

Объекты/области применения

Предназначено для предстерилизационной очистки механизированным способом изделий медицинского назначения из различных материалов (включая хирургические и стоматологические инструменты, принадлежности наркозно-дыхательной аппаратуры), для использования в моечно-дезинфицирующих машинах любого типа, оснащенных дозирующим устройством, а также для мойки суден в судно-моечных машинах.

Характеристики продукта

Эффективно удаляет кровяные и белковые загрязнения.

Инструкция по использованию и дозировке

Рекомендуемая концентрация рабочего раствора - 0,3 %.
Способ применения и меры предосторожности подробно изложены в инструкции по применению средства.

Внимание

Рекомендуется использовать защитные перчатки. Избегать разбрызгивания и попадания средства в глаза и на кожу.

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Комплексообразующее вещество	5 - 15%	Смягчает воду, повышает эффект очистки
Поликарбоксилаты	< 5%	Препятствуют образованию отложений в жесткой воде
Метасиликат натрия	< 5%	Обладает антикоррозийными свойствами, усиливает моющий эффект

pH продукта

ок. 11.8

pH рабочего раствора

ок. 11.0

Внешний вид и запах

Прозрачная жидкость с характерным запахом.

Хранение

Хранить на складе в оригинальной упаковке в темном, сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения от 0°C до + 35°C. Срок хранения - 3 года с момента производства в упаковке производителя.

Окружающая среда и безопасность

Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные / поверхностные или подземные воды и в канализационную систему. Слив средства в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде, не смешивая с другими химическими средствами.

Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта

Упаковочные материалы

5 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 05 PP

Код продукта, размер упаковки

Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
3 x 5 л	205245	4607070472780	канистра